



Doküman No: MUD – GT01

Yürürlük Tarihi: 07.03.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

SOLUNUM FONKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Sevda YÜCEL

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: MUD – GT01

Yürürlük Tarihi: 07.03.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

SOLUNUM FONKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı SFT cihazının doğru bir şekilde kullanılmasına sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat SRM hemşirelerini kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Yapılacak işlem hastaya anlatılır.

3.2. Sol yanda açma –kapama tuşuna basınız.

3.3. ID Tuşuna basarak hasta bilgilerini giriniz.

Date: tarih yazınız,

ID Number: Öğrenci no mutlaka yazınız,

Name: yazılmıyor,

Sex: Male(Erkek),Female (Kadın) seçiniz,

Birthdate: Gün-ay-yıl olarak mutlaka giriniz.

Cm: Yazınız

Kilo: Yazınız

(Tüm bilgileri girerken enter tuşuyla ilerleyin)

NOT: CLR silme tuşu

3.4. ENTER tuşuna basınız.

3.5. FVC tuşuna basınız.

3.6. START tuşuna basınız.

3.7. KIRMIZI-SARI ışık yanıp sönecek ışık **MAVİ** olunca hastaya 3 normal nefes alıp vermesini söyleyiniz beklemeden 1 DERİN nefes alabildiğinde hızlı nefes alıp vermesini söyleyiniz.

3.8. İşlem bittiğinde **STOP** tuşuna basınız.

3.9. Çıktıyı almak için **PRINT** tuşuna basınız.

4.KALİBRASYON KONTROLÜ: Firma tarafından yapılır