



Doküman No: MÜD-GT20

Yürürlük Tarihi: 04.02.2003

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 07.03.2014

STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayınlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
07.03.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Sevda YÜCEL

Müdahale Odası Hemşiresi

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: MÜD-GT20

Yürürlük Tarihi: 04.02.2003

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 07.03.2014

STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, sterilizasyon poşeti kapatma cihazının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat, cihazı kullanacak hemşireyi kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. HAWO marka cihazın fişi prize takılır.

3.2. Cihazın sağ yanındaki düğmeden sıcaklık istenilen ayara getirilir.

3.3. Sterilizasyon poşeti cihazın üst aralığından geçirilerek, cihazın ısı ile poşet kapatılır ve bıçağı ile kesecek olan bölümünün mandalı sağa doğru çekilir. Poşet kapanır ve poşetin uzun olan ucu kesilmiş olur.

3.4. Poşet içine steril edilecek malzeme konulur.

3.5. Poşetin alt kısmının ağzını kapatmak için poşet ağzı cihazın alt aralığından geçirilerek cihazın mandalı sola doğru çekilir.

3.6. Poşet kapatma işi bitince alet prizden çekilir.