



Doküman No: RAD-GT04

Yürürlük Tarihi: 15.06.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.01.2008

## BANYO CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
17.01.2008	İçerik Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Yasemin Özcan

Radyoloji Teknisyeni

İMZA

ONAYLAYAN Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

ONAYLAYAN: Feza KORKUSUZ

Başhekim

İMZA



Doküman No: RAD-GT04

Yürürlük Tarihi: 15.06.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.01.2008

## BANYO CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1. AMAÇ:** Banyo cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

**2. KAPSAM:** Radyoloji bölümü teknisyenlerini kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

**3.1.** Banyo cihazının sorumluluğu kullanan teknisyenlere aittir.

**3.2.** Cihaz otomatiktir on off düğmesi cihazı açıp kapatmaya yarar

**3.2.** Her sabah cihaz çevresi temizlenir, **ON** düğmesine basılarak açılır. Cihazın üzerindeki derece düğmesi cihaz ısınmaya kadar yanıp söner. Cihaz ısındıktan sonra sesli sinyal verir ve derece kısmı sabit kırmızı yanar.

**3.3.** Cihazın derece ayarları vardır. (28C- 37C) kadar. Standartlara uygun cihazın derecesi 32C kullanılmaktadır.

**3.4.** Cihaz ısındıktan sonra 1-2 adet eski filmlerden atılarak cihaz merdanelerinin temizlenmesi sağlanır.

**3.5.** Cihaz filmlerin banyo edilmesine uygun hale getirildikten sonra filmler sırayla banyo cihazına atılır. 1. filmden sonra cihaz sinyal verdikten sonra 2. film cihaza atılır.

**3.6.** Cihazın teknik arızaları teknik servise yapılır.