



Doküman No: RAD-GT07

Yürürlük Tarihi: 26.03.2002

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 05.10.2005

İSİM BASMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Özgür ALTAY

Radyoloji Teknisyeni

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: RAD-GT07

Yürürlük Tarihi: 26.03.2002

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 05.10.2005

İSİM BASMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: İsim basma cihazını doğru bir şekilde kullanmak

2. KAPSAM: Radyoloji birimi tüm personeli kapsar

3. UYGULAMA:

3.1. Cihaz, fişi prize takılarak açılır-kapanır. Ayrıca bir On-Off düğmesi yoktur.

3.2. F1 tuşuyla hasta bilgileri (Protokol no,ad-soyad, yaş, cinsiyet) cihaza girilir. F2 tuşuyla kaydedilir.

3.3. Sıradan hasta çağırmak için F2 tuşuyla isim listesine girilir. F1 tuşuyla liste aktif hale getirilerek seçim yapılır. Enter tuşuyla istenen hasta kaydı ekrana getirilir.

3.4. Film çekilen kaset cihazın ilgili bölmesine takılarak, hasta bilgileri otomatik olarak, film üzerine aktarılır.

3.5. Cihaz, fişi prizden çekilerek kapatılır.