



DokümanNo:URO-GT01

Yürürlük Tarihi: 14.11.2005

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

## ÜROFLOWMETRİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Zorlu PAKSOY

Üroloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



DokümanNo:URO-GT01

Yürürlük Tarihi: 14.11.2005

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

## ÜROFLOWMETRİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, Üroflowmetri cihazının doğru bir şekilde kullanılmasıdır.
- 2. KAPSAM:** Bu talimat, Üroloji Uzmanını kapsar.
- 3. UYGULAMA**
  - 3.1.** Tetkik yapılması düşünülen hasta kesinlikle idrara sıkışık vaziyette, en azından mesanesi dolu durumda olmalıdır. 150 ml.den az volümlerle yapılan test sonuçları güvenilir değildir.
  - 3.2.** Sonuç alınabilmesi için aletin bilgisayar donanımının yüklenmiş olduğu bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda donanım sadece Üroloji Doktoru'nun bilgisayarında yüklüdür
  - 3.3.** Uygun durumda gelen hastaya testin uygulanması için bilgisayar üzerindeki program açılıp "new patient" bölümüne hasta ile ilgili bilgiler girildikten sonra, alet hastaya verilerek tüm idrarını aletin içine yapması söylenir.
  - 3.4.** Bu arada yine program üzerinde hastanın idrarını yapmasıyla yaklaşık eş zamanlı ya da biraz daha önce olmak üzere sırasıyla "start üroflow" ve "start miksiyon" tuşlarına basarak hastanın kaydı otomatik olarak alınmaya başlanır.
  - 3.5.** Sonuç aynı zamanda printerden çıktı olarak da otomatik olarak verilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde "yazdır" tuşu ile ikinci bir çıktı hastaya verilmek veya arşivlemek amacıyla alınabilir.
  - 3.6.** Daha sonraki hastaların kayıtlarının sağlıklı alınabilmesi için aletin idrar kabı itina ile temizlenmelidir.